



Accel[®] Cinq TB

Prêt à utiliser Nettoyant et désinfectant de surface tout-en-un

Tuberculocide, virucide, bactéricide, fongicide, assainisseur à large spectre

Un nettoyant désinfectant facile à utiliser basé sur les propriétés de la technologie AHP[®] afin d'offrir un rendement de nettoyage efficace et rapide.

Caractéristiques et Avantages

- Efficace contre les principaux pathogènes, notamment le SARM, le EVR, la tuberculose, le norovirus, le VIH et le poliovirus; offre une désinfection à large spectre
- Virucide, bactéricide, tuberculocide et fongicide en 5 minutes. Il s'agit également d'un désinfectant à large spectre de 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses tout en maîtrisant la puissance de la technologie AHP[®]. L'agent actif AHP[®] se décompose en oxygène et en eau après utilisation
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol. Non irritant pour les yeux et la peau
- Nettoie et désinfecte les surfaces fréquemment touchées en une seule étape pour gagner du temps

Applications

- Nettoie et désinfecte les surfaces souvent touchées en 5 minutes
- Non irritant pour les yeux et la peau





Accel[®] Cinq TB

Prêt à utiliser Nettoyant et désinfectant de surface tout-en-un

Mode d'emploi

En tant que nettoyant et désinfectant tout-en-un* :

- Nettoyer préalablement les endroits souillés.
- Appliquer le produit sur des surfaces inanimées dures non poreuses.
- Toutes les surfaces doivent rester mouillées durant 5 minutes.
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin.

Avant la première utilisation sur une surface en particulier, il est recommandé de tester sur une petite surface cachée en cas d'inquiétude d'incompatibilité ou de communiquer avec un représentant Diversey.

* Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes

Données techniques	Accel [®] Cinq TB
DIN	02247924
Couleur	Liquide incolore
pH	1,8
Parfum	Caractéristique des ingrédients
Durée de conservation	3 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Accel [®] Cinq TB	12 bouteilles de 946 mL / 1 U.S. Qt.	Prêt-à-l'emploi	100906726 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Accelerated Hydrogen Peroxide[®] et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.