

# Lingettes Accel® INTERVention®

## Nettoyant et désinfectant de surface tout-en-un

Désinfectant à spectre large tuberculocide, viroicide, bactéricide fongicide

Une lingette nettoyante et désinfectante préhumide prête à utiliser basée sur la technologie propriétaire AHP® pour offrir une performance de nettoyage rapide et efficace.

### Caractéristiques et avantages

- Efficace contre les principaux pathogènes, notamment le SARM, le EVR, la tuberculose et le norovirus, pour une désinfection à large spectre
- Élimine le norovirus, le poliovirus et les pathogènes à diffusion hémotogène et est tuberculocide, et ce, en une (1) minute. Il s'agit également d'un désinfectant à large spectre de 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses tout en maîtrisant la puissance de la technologie AHP®. L'agent actif AHP® se décompose en oxygène et en eau après utilisation.
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol. Non irritant pour les yeux et la peau
- Nettoient et désinfectent les surfaces hautes en une seule minute

### Applications

- Nettoient et désinfectent les surfaces hautes en UNE (1) seule minute
- Non irritant pour les yeux et la peau





# Lingettes Accel<sup>®</sup> INTERVention<sup>®</sup>

Nettoyant et désinfectant de surface tout-en-un



## Mode d'emploi : Comme désinfectant nettoyant tout-en-un\*

- Nettoyer préalablement les endroits souillés.
- Appliquer la lingette jetable aux surfaces dures non poreuses inanimées
- Toutes les surfaces doivent rester visiblement mouillées pendant 1 minute
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur une petite surface cachée en cas d'inquiétude d'incompatibilité, ou communiquer avec un représentant Diversey.

\*Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes

Données techniques	Lingettes Accel <sup>®</sup> INTERVention <sup>®</sup>
DIN	02448637
Couleur/forme	Lingette incolore
pH	3
Odeur	Caractéristiques des ingrédients
Durée sur les tablettes	3 ans

Produit	Emballage	Dilution	Code du produit
Lingettes Accel <sup>®</sup> INTERVention <sup>®</sup>	Contenants de 12 x 160 lingettes de 15,24 cm x 17,78 cm / 6 po x 7 po	Prêt à utiliser	100906585 
Lingettes Accel <sup>®</sup> INTERVention <sup>®</sup>	Contenants de 12 x 60 lingettes de 25,4 cm x 25,4 cm / 10 po x 10 po	Prêt à utiliser	100906584 

## Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. Les FS sont disponibles en ligne au [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.

AHP et Design<sup>®</sup> sont des marques de commerce enregistrées de Virox Technologies, Inc. utilisées sous license.