



# Accel<sup>®</sup> PREvention<sup>™/MC</sup> RTU

Nettoyant et  
désinfectant  
de surface  
tout-en-un



Désinfectant tuberculocide, virucide, bactéricide et fongicide à large spectre.

Une lingette nettoyante désinfectante prête à l'emploi, fabriquée selon une technologie exclusive à AHP<sup>®</sup> afin d'offrir un rendement nettoyant efficace et rapide.

## Caractéristiques

- Nettoyant désinfectant en une étape
- Optimisé par la technologie AHP<sup>®</sup>
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol
- Respectueux de l'environnement: son ingrédient actif se dématérialise en oxygène et en eau

## Avantages

- Efficace contre les principaux pathogènes comme: les SARM, ERV, TB et le norovirus
- Élimine les norovirus, poliovirus et VIH; il est tuberculocide et agit en 3 minutes
- Désinfectant à large spectre, il agit en 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses
- Nettoie et désinfecte les surfaces en une étape, permettant d'économiser temps et main-d'œuvre

## Applications

- Nettoie et désinfecte les surfaces souvent touchées en 3 minutes
- Non irritant pour les yeux et la peau



## Suivre les directives

### Comme désinfectant nettoyant en une étape\* :

- Prénettoyer les surfaces très souillées.
- Appliquer par vaporisation à gros jet pour appliquer le produit sur les surfaces inanimées dures et non poreuses
- Toutes les surfaces doivent rester mouillées pendant 3 minutes
- Essuyer les surfaces, rincer ou sécher à l'air

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur un coin caché si on craint l'incompatibilité ou communiquer avec un représentant de soins Diversey.

\* Consulter l'étiquette intégrale du produit pour la liste complète des instructions s'y rapportant

## Spécifications du produit

Description	
DIN	02448521
Certifications	Ecologo
Couleur/Forme	Liquide incolore
pH	2,1
Odeur	Caractéristique
Durée de conservation	2 ans

## Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
100906589	12 x 1 L / 1.06 U.S Qt. bouteilles	Prêt-à-l'emploi
100908439	4 X 4 L / 1.06 U.S. Gal. conteneurs	Prêt-à-l'emploi

## Rappel des consignes de sécurité

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.sealedair.com](http://www.sealedair.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.