



Lingettes Accel[®] Cinq TB

Nettoyant et désinfectant de surface

Désinfectant à spectre large tuberculocide, viroicide, bactéricide fongicide

Lingettes nettoyantes désinfectantes

Une lingette nettoyante désinfectante préhumectée facile à utiliser basée sur les propriétés de la technologie AHP[®] afin d'offrir un rendement de nettoyage efficace et rapide.

Caractéristiques et Avantages

- Efficace contre les principaux pathogènes, notamment le SARM, le EVR, la tuberculose, le norovirus, le VIH et le poliovirus; offre une désinfection à large spectre
- Virocide, bactéricide, tuberculocide et fongicide en 5 minutes. Il s'agit également d'un désinfectant à large spectre de 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses tout en maîtrisant la puissance de la technologie AHP[®]. L'agent actif AHP[®] se décompose en oxygène et en eau après utilisation
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol. Non irritant pour les yeux et la peau
- Lingettes humides pratiques pour nettoyer et désinfecter en une seule étape pour gagner du temps

Applications

- Nettoie et désinfecte les surfaces souvent touchées en 5 minutes
- Non irritant pour les yeux et la peau





Lingettes Accel[®] Cinq TB

Nettoyant et désinfectant de surface

Mode d'emploi

Comme désinfectant nettoyant en une étape* :

- Nettoyer préalablement les endroits souillés.
- Appliquer la lingette jetable aux surfaces dures non poreuses inanimées.
- Toutes les surfaces doivent rester mouillées durant 5 minutes.
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin.

Avant d'utiliser pour la première fois sur une surface particulière, il est recommandé de mettre le produit à l'essai dans un petit endroit discret si on s'inquiète de l'incompatibilité, ou communiquez avec un représentant du service à la clientèle de Diversey.

* Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes

Données techniques	Lingettes Accel [®] Cinq TB
DIN	02247932
Couleur	Lingette incolore
pH	1,8
Parfum	Caractéristique des ingrédients
Durée de conservation	3 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Lingettes Accel [®] Cinq TB	12 x 160 comptage 6 x 7 in. Lingettes / 15,24 x 17,78 cm Seaux	Prêt-à-l'emploi	100906729	🇨🇦
Lingettes Accel [®] Cinq TB	12 x 60 comptage 10 x 10 in. Lingettes / 25,4 x 25,4 cm Seaux	Prêt-à-l'emploi	100906728	🇨🇦

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.

Les logos du peroxyde d'hydrogène (Accelerated Hydrogen Peroxide^{TM/MC}) et AHP[®] sont des marques commerciales brevetées détenues par Virox Technologies et utilisées sous licence.