



Accel® PREvention™/MC Toallitas

Limpiador y desinfectante de superficies en un solo paso

Tuberculocida, virucida, bactericida, fungicida, sanitizante de amplio espectro

Un paño de limpieza desinfectante prehumedecido listo para usar basado en la tecnología exclusiva AHP® para ofrecer un rendimiento de limpieza rápido y eficaz.

Características y beneficios

- Eficaz contra patógenos clave, como MRSA, VRE, TB, Norovirus, VIH y Poliovirus, que brindan una desinfección de amplio espectro.
- Virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida, todo en 3 minutos También es un sanitizante de amplio espectro de 30 segundos
- Compatible con la mayoría de las superficies duras y no porosas al tiempo que aprovecha la potencia de la tecnología AHP®.
- El principio activo de AHP® se descompone en oxígeno y agua después del uso
- Sin COV, sin fragancias agregadas y sin NPE.
- Las toallitas prehumedecidas convenientes limpian y desinfectan en un solo paso que ahorra mano de obra

Aplicaciones

- Limpie y desinfecte superficies de alto tacto en 3 minutos





Accel® PREvention™/MC Toallitas

Limpiador y desinfectante de superficies en un solo paso

Instrucciones de uso: Como Limpiador/Desinfectante en un paso*

- Limpie previamente las áreas muy sucias.
- Aplique la toallita desechable a superficies duras, no porosas, inanimadas.
- Todas superficies deben permanecer mojadas durante 3 minutos
- Deje secar al aire, pase un paño sobre las superficies para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario.

Todas las superficies de contacto con alimentos deben enjuagarse con agua potable.

Antes del primer uso en una superficie en particular, se recomienda probar en un área reducida y discreta en caso de tener alguna inquietud sobre la incompatibilidad, o contacte a un representante de Diversey Care.

* Consulte la etiqueta del producto para ver las instrucciones de uso completas

Datos técnicos	Accel® PREvention™/MC Toallitas
DIN	02448459
Color/forma	Incoloro / Toallita
pH	2,1
Aroma	Característico de los ingredientes
Vida útil	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto	
Accel® PREvention™/MC Toallitas	12 x 160 toallitas de 15,24 cm x 17,78 cm / 6 pulg. x 7 pulg.	Listo para usar	100906721	🇨🇦
Accel® PREvention™/MC Toallitas	12 x 60 toallitas de 25,4 cm x 25,4 cm / 10 pulg. x 10 pulg.	Listo para usar	100906722	🇨🇦
Accel® PREvention™/MC Toallitas	120 x 10 toallitas de 19 cm x 25,4 cm / Paquetes blandos de 7,5 pulg. x 10 pulg. (10 toallitas por paquete, 20 paquetes por caja, 6 cajas por cajón)	Listo para usar	100906590	🇨🇦

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

AHP y Design® Son marcas comerciales registradas de Virox Technologies, Inc. usadas bajo licencia.