

Accel PREVention™ Lingettes

Nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Désinfectant tuberculocide, virucide, bactéricide et fongicide à large spectre

Une lingette nettoyante désinfectante préhumectée et prête à l'emploi, fabriquée selon une technologie exclusive à AHP $^{\odot}$ afin d'offrir un rendement nettoyant efficace et rapide.

Caractéristiques et Avantages

- Efficace contre les principaux pathogènes, notamment le SARM, le EVR, la tuberculose, le norovirus, le VIH et le poliovirus; offre une désinfection à large spectre
- Virucide, bactéricide, tuberculocide et fongicide en 3 minutes. Il s'agit également d'un désinfectant à large spectre de 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses tout en maitrisant la puissance de la technologie AHP®
- L'agent actif AHP® se décompose en oxygène et en eau après utilisation
- Sans COV, aucun parfum ni teinture ajouté et sans éthoxylates de nonylphénol
- Lingettes humides pratiques pour nettoyer et désinfecter en une seule étape pour gagner du temps

Applications

• Nettoie et désinfecte les surfaces souvent touchées en 3 minutes







Accel PREVention™ Lingettes

Nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Suivre les directives : Comme désinfectant nettoyant en une étape*

- Prénettoyer les surfaces très souillées.
- Appliquer la lingette jetable sur les surfaces inanimées dures et non poreuses.
- Toutes les surfaces doivent rester visiblement mouillées pendant 3 minutes.
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin.

Toutes les surfaces en contact avec des aliments doivent être rincées à l'eau potable.

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur un coin caché si on craint l'incompatibilité ou communiquer avec un représentant de soins Diversey.

* Consulter l'étiquette intégrale du produit pour la liste complète des instructions s'y rapportant

Données techniques	Accel PREVention™ Lingettes
DIN	02448459
Couleur	Lingette incolore
рН	2,1
Parfum	Caractéristique des ingrédients
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Accel PREVention™ Lingettes	12 x 160 comptage 6 x 7 in. Lingettes / 15,24 x 17,78 cm Seaux	Prêt-à-l'emploi	100906721	I+I
Accel PREVention™ Lingettes	12 x 60 comptage 10 x 10 in. Lingettes / 25,4 x 25,4 cm Seaux	Prêt-à-l'emploi	100906722	I÷I
Accel PREVention™ Lingettes	120 X 10 comptage 7,5 X 10 in. Lingettes / 19 cm x 25,4 cm Seaux	Prêt-à-l'emploi	100906590	I+I

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.