



Oxivir® Tb Toallitas

Desinfectante general virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida

Limpiador desinfectante previamente humedecido, listo para usar basado en la tecnología patentada AHP® para una limpieza rápida y efectiva.

Características y beneficios

- Limpiador desinfectante en un solo paso potenciado por la tecnología AHP®
- Eficaz contra patógenos clave: TB, MRSA, norovirus, VRE y *Candida auris*
- Mata el VHB, el VHC y el VIH en 1 minuto. Tuberculocida en 5 minutos y Fungicida en 3 minutos y 5 minutos para *Candida auris*
- Sin COV, sin fragancias agregadas y sin NPE. Ambientalmente responsable: el ingrediente activo se descompone en oxígeno y agua
- Mata el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 en superficies duras no porosas en 15 segundos
- Conveniente: las toallitas prehumedecidas hacen que incluso el trabajo más duro sea más fácil y compatible con la mayoría de las superficies duras y no porosas

Aplicaciones

- Limpia y desinfecta superficies de alto contacto en solo UN minuto
- No irrita los ojos y la piel





Oxivir® Tb Toallitas

Desinfectante general virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida

Instrucciones de uso

Como desinfectante de un solo paso

- Limpia en profundidad las áreas sucias.
- Aplica el producto con el spray grueso o con un paño descartable para limpiar superficies duras, no porosas e inanimadas.
- Todas las superficies deben estar visiblemente húmedas por 1 minuto.
- Utilice un tiempo de contacto de 5 minutos para la tuberculosis y un tiempo de contacto de 3 minutos para los hongos y de 5 minutos para la *Candida auris*.
Deje secar al aire, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua limpia según sea necesario.

Nota: No es necesario enjuagar al menos que se vaya a revestir o restaurar la superficie. Todas las superficies en contacto con alimentos deben ser enjuagadas con agua potable. No utilice el limpiador para limpiar vasos, platos ni utensilios.

Antes de utilizar el producto por primera vez sobre una superficie determinada, se recomienda probarlo sobre un área pequeña y discreta en caso de tener dudas sobre su incompatibilidad, o contactar a un representante de Diversey.

Datos técnicos	Oxivir® Tb Toallitas
EPA Reg. No.	70627-60
Color/Forma	Incoloro, toallita
pH	2.2 - 3.2
Aroma	Característica
Tiempo de conservación	3 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Oxivir® Tb Toallitas	12 x 160 c/u, toallitas pequeñas, botes	Listo para usar	4599516
Oxivir® Tb Toallitas	4 x 160 c/u, toallitas pequeñas, botes	Listo para usar	101105152
Oxivir® Tb Toallitas	12 x 60 c/u, toallitas medianas, botes	Listo para usar	5388471
Oxivir® Tb Toallitas	4 x 160 c/u, toallitas extragrandes, cubos	Listo para usar	5627427
Oxivir® Tb Toallitas	4 x 160 c/u, toallitas extragrandes, recambios	Listo para usar	100823906
Oxivir® Tb Toallitas	120 x 10 c/u, toallitas medianas, paquetes suaves	Listo para usar	101107341

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.

AHP® y Design son marcas comerciales de Diversey, Inc.