

Canesten® GYNO Balance

Bacteriële Vaginose
Capsule voor
vaginaal gebruik



Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik bevat melkzuur, waarvan klinisch is bewezen dat het effectief de symptomen van bacteriële vaginose behandelt door herstel van de normale pH en van de bacterieflora in de vagina.

Wat is Bacteriële Vaginose (BV)?

Bacteriële Vaginose is een veelvoorkomende vaginale aandoening. Normaal gesproken leven er verschillende soorten bacteriën in de vagina, vooral melkzuurbacteriën. Melkzuurbacteriën produceren het verzurende melkzuur, handhaven de normale lage pH van de vagina en dragen bij aan de bescherming van de vagina tegen infectie. Bij deze lage pH wordt de groei van ongewenste bacteriële micro-organismen doorgaans geremd. Wanneer de aantallen melkzuurbacteriën afnemen en de pH stijgt, is er sprake van een verandering in de normale toestand en groei van ongewenste bacteriën. Deze aandoening wordt 'Bacteriële Vaginose' genoemd. De belangrijkste symptomen bij Bacteriële Vaginose zijn een onaangename visachtige geur, abnormale afscheiding en ongemak in de vagina.

Waardoor wordt Bacteriële Vaginose veroorzaakt?

Factoren die het milieu in de vagina veranderen en een Bacteriële Vaginose kunnen veroorzaken, zijn onder meer langdurige menstruatie, het gebruik van producten voor intieme hygiëne, vaak een vaginale douche gebruiken, anticonceptie, medicatie voor vaginaal gebruik, geslachtsgemeenschap en stress. Antibioticakuren en een spiraaltje kunnen ook het evenwicht in de vagina beïnvloeden.

Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik behandelt de symptomen van Bacteriële Vaginose - op een natuurlijke manier

De capsule bevat melkzuur, dat de normale pH van de vagina herstelt en daardoor de onaangename geur effectief neutraliseert.

Het bevat ook glycogeen, dat voedingsstoffen levert voor melkzuurbacteriën en hun groei ondersteunt. Bij een normale pH en met voedingsstoffen groeien de beschermende melkzuurbacteriën en wordt het natuurlijke evenwicht in de vagina hersteld; ook worden de abnormale afscheiding en het ongemak effectief verlicht. De behandeling wordt geleverd in gemakkelijk te gebruiken capsules voor eenmalig gebruik.

Wanneer wordt Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik gebruikt?


Het is aan te bevelen Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik in te brengen voor het slapen gaan. Het is raadzaam om een inlegkruisje te dragen, omdat de capsule een beetje kan lekken. Dit betekent niet dat de behandeling niet heeft gewerkt.

Hoe wordt Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik gebruikt?

Behandeling	Voor effectieve verlichting van een onaangename geur, abnormale afscheiding en ongemak veroorzaakt door Bacteriële Vaginose	Gebruik dagelijks 1 capsule gedurende 7 dagen

Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik is gemakkelijk te gebruiken

Breng de capsule zo diep mogelijk in de vagina in. De capsule mag niet worden gebroken omdat deze bedoeld is voor eenmalig gebruik.

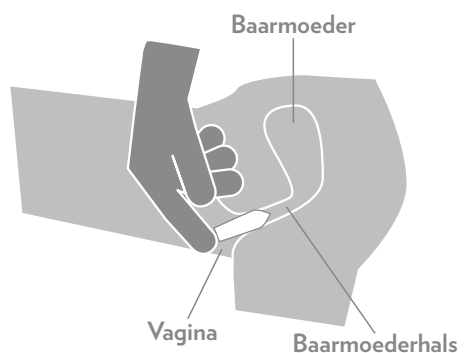

**Canesten® GYNO Balance
Bacteriële Vaginose, capsule voor
vaginaal gebruik bevat melkzuur,
klinisch getest**

Uit klinisch onderzoek is gebleken dat Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik, veilig, mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing en effectief is. Doordat de pH-balans wordt hersteld, heeft de capsule een drievoudig voordeel aangezien deze de onaangename geur en de abnormale afscheiding verlicht, de groei van ongewenste bacteriën remt en goede bacteriën (Lactobacillus) ondersteunt voor herstel van het natuurlijke milieu.

**Canesten® GYNO Balance
Bacteriële Vaginose, capsule voor
vaginaal gebruik kan met een gerust
gevoel gebruikt worden.**

Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik wordt geleverd in hygiënische capsules voor eenmalig gebruik. De capsule kan tijdens de zwangerschap en de menstruatie worden gebruikt. U moet echter uw arts raadplegen als u tijdens uw zwangerschap denkt dat u mogelijk een vaginale infectie hebt. Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik kan soms een wat prikkend, branderig en jeukend gevoel veroorzaken wanneer er sprake is van kleine scheurtjes in het weefsel van de vagina. Dit is maar tijdelijk en zou moeten verdwijnen. Raadpleeg een arts of apotheker als u zich zorgen maakt.

**Wanneer moet u uw arts
raadplegen?**

Neem contact op met uw arts als uw symptomen verergeren, als u pijn hebt, als het ongemak niet verdwijnt, als uw afscheiding bloed bevat of als uw afscheiding optreedt in de menopauze. U moet uw arts raadplegen als u tijdens uw zwangerschap denkt dat u mogelijk een vaginale infectie hebt. Als de symptomen niet verdwijnen na gebruik van Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik volgens de gebruiksaanwijzing, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts voor verder advies.

**Wat zit er in een verpakking van
Canesten® GYNO Balance
Bacteriële Vaginose, capsule voor
vaginaal gebruik?**

De verpakking bevat 7 comfortabele capsules voor vaginaal gebruik voor eenmalig gebruik.

Elke capsule bevat de volgende bestanddelen:
Macrogols, Melkzuur,
Natriumhydroxide, Glycogeen,
pH 3.6-4.2.

Zonder conserveermiddelen.
Hormoonvrij. Geen parfum.

Waarschuwingen

Gebruik de capsule niet wanneer deze is beschadigd.

Gebruik de capsule niet na de vervaldatum.

Buiten het bereik van kinderen houden. Niet geschikt voor gebruik bij kinderen.

Gebruik de capsule niet wanneer je allergisch bent voor één van de ingrediënten.

Voorzichtig

Vermijd het gebruik van Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik wanneer u zwanger probeert te worden, aangezien de capsule een lage pH heeft waardoor het milieu minder geschikt kan zijn voor zaadcellen. Niet gebruiken als voorbehoedsmiddel. Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik is veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap. Echter u dient een arts te raadplegen wanneer u denkt dat u een vaginale infectie heeft tijdens de zwangerschap.

Ga naar onze website voor meer informatie en veelgestelde vragen:
www.canesten.nl




Fabrikant

Rolf Kullgren AB, Ågatan 4,
646 30 Gnesta Sweden

Distributeur

Bayer B.V.
Consumer Health Division
Postbus 80
3640 AB Mijdrecht
www.canesten.nl

Canesten® GYNO Balance Bacteriële Vaginose, capsule voor vaginaal gebruik is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

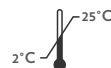

© 2020

Alle rechten voorbehouden.

Bayer

44108-01
28058993