



Oxivir® Tb Lingettes

Nettoyant de surface prêt à utiliser et désinfectant de niveau intermédiaire, virucide général, fongicide, assainissant, et mycobactéricide

Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi, basé sur notre technologie brevetée de peroxyde d'hydrogène (AHP®), pour fournir une performance de nettoyage rapide et efficace.

Caractéristiques et Avantages

- Bactéricide, Tuberculocide et Virucide en une minute ; Fongicide en trois minutes et *Candida auris* en cinq minutes
- Tue le SARS-CoV-2 en 15 secondes
- Satisfait aux normes de Santé Canada pour le nettoyage et la décontamination provenant du sang et des liquides organiques
- Compatible avec la plupart des surfaces dures et non poreuses tout en utilisant le pouvoir nettoyant de la technologie au peroxyde d'hydrogène accéléré® (AHP)
- L'AHP® actif se décompose en oxygène et en eau après utilisation
- Pour une performance de nettoyage efficace et rapide

Applications

- Nettoie et désinfecte les surfaces très touchées
- Produit non irritant pour les yeux et la peau essuyer





Oxivir® Tb Lingettes

Nettoyant de surface prêt à utiliser et désinfectant de niveau intermédiaire, virucide général, fongicide, assainissant, et mycobactéricide

Oxivir® Tb Lingettes est un produit nettoyant désinfectant prêt à l'emploi, basé sur notre technologie brevetée de peroxyde d'hydrogène (AHP®), pour fournir une performance de nettoyage rapide et efficace. Les serviettes.

Mode d'emploi

- Nettoyer à l'avance les zones très salies
- Appliquer du produit avec un linge ou un chi on jetable sur des surfaces environnementales dures non poreuses
- Toutes les surfaces doivent rester humides pendant une minute pour tuer bactéries, HIV-1, HBV et HCV
- Sécher les surfaces à l'air, les essuyer pour sécher et enlever tout résidu ou rincer à l'eau potable le cas échéant
- Fournit une désinfection à large spectre des surfaces de contact non alimentaires en seulement 30 secondes
- Non recommandé pour utilisation sur laiton, cuivre, aluminium, bronze, granit, zinc ou marbre
- Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable après désinfection
- Toutes les surfaces doivent rester humides pendant cinq minutes pour tuer *Candida auris*

| Données techniques | Oxivir® Tb Lingettes |
|-------------------------|----------------------------------|
| N° d'enregistrement DIN | 02283530 |
| Certificats | LONO |
| Couleur/Forme | Lingettes incolores |
| pH | 2,2 – 3,2 |
| Parfum | Caractéristiques des ingrédients |
| Durée de conservation | 3 ans |

| Produit | Contenance | Dilution | Code produit | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|----|
| Oxivir® Tb Lingettes | 12 x 160 (6 x 7 pouce lingettes) / 15,24 x 17,78 cm Bacs | Prêt à l'emploi | 5144708 | 🇨🇦 |
| Oxivir® Tb Lingettes | 4 x 160 compteurs (11 x 12 pouce lingettes) / 27,9 x 30,5 cm Seaux | Prêt à l'emploi | 5627460 | 🇨🇦 |
| Oxivir® Tb Lingettes | 12 x 60 compteurs (7 x 8 pouce lingettes) / 17,78 x 20,32 cm Bacs | Prêt à l'emploi | 5995422 | 🇨🇦 |
| Oxivir® Tb Lingettes | 4 x 160 compteurs (11 x 12 pouce lingettes) / 27,9 x 30,5 cm Recharge | Prêt à l'emploi | 100823907 | 🇨🇦 |
| Oxivir® Tb Lingettes | 120 x 8 compteurs (7,48 x 10 pouce lingettes) / 18.99 x 25.4 cm paquets souples | Prêt à l'emploi | 101105219 | 🇨🇦 |

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.