



# Oxivir® 1 Toallitas

## Toallita de limpieza desinfectante para hospitales lista para usar en un solo paso

Toallita de limpieza desinfectante de un solo paso, lista para usar, pre-humedecida, de última generación, basada en la exclusiva tecnología AHP®. Las toallitas Oxivir® 1 están formuladas para proporcionar una desinfección de amplio espectro en UN minuto o menos, con 75 beneficios de desinfección en total.

### Características y Beneficios

- Limpiador, desinfectante y sanitizante de amplio espectro para múltiples superficies. Utiliza el poder de limpieza del peróxido de hidrógeno. Especialmente diseñado para penetrar las suciedades más difíciles
- Fórmula rápida, efectiva, responsable y sustentable. Ecológicamente responsable, sin compuestos orgánicos volátiles, sin fragancia agregada, sin NPE. Formula conveniente y de acción rápida, adecuada para el uso diario y con un tiempo de contacto de UN minuto o menos
- Formulado con la tecnología patentada AHP® que no contiene fosfatos, cuaternarios ni fenoles. El ingrediente activo se descompone en agua y oxígeno después de su uso
- Tiempos de contacto de 1 minuto o menos como virucida, 1 minuto como bactericida, tuberculocida y fungicida y de 10 segundos para sanitización de superficies que no estén en contacto con alimentos
- Cumple con la categoría de toxicidad más baja de la EPA en los 6 estudios de toxicidad, por lo que es una elección responsable para los usuarios, cerca de los pacientes y en las superficies más comunes de atención médica. Limpia, desinfecta y desodoriza en un paso

### Aplicaciones

- Este producto puede usarse en áreas múltiples, que incluyen quirófanos, centros de cuidado a largo plazo, centros médicos, centros para el tratamiento de animales, cruceros, hoteles, edificios públicos, baños públicos, centros de recreación, empresas minoristas y escuelas (colegios y universidades), y es compatible con la mayoría de las superficies rígidas no porosas





# Oxivir® 1 Toallitas

Toallita de limpieza desinfectante para hospitales lista para usar en un solo paso

## Instrucciones de uso

- Realice una limpieza previa de las áreas muy sucias
- Limpie las superficies rígidas y no porosas expuestas al medio ambiente con una toallita
- Deje que la superficie permanezca mojada durante 1 minuto. (Para ciertos virus en la lista, deje mojado por 30 segundos)
- Deje secar al aire, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua limpia según sea necesario

**Nota:** Todas las superficies de contacto con alimentos deben enjuagarse con agua potable. No use este producto en cristalería, utensilios o platos.

Oxivir® 1 es compatible con la mayoría de las superficies comunes de atención médica. Antes del primer uso en una superficie en particular, se recomienda probar en un área reducida y discreta en caso de tener alguna inquietud sobre la incompatibilidad, o contacte a un representante de Diversey.

Datos técnicos	Oxivir® 1 Wipes
EPA Reg. No	70627-77
Color/Forma	Toallita incolora
pH	1.7-2.5
Aroma	Característica
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Oxivir® 1 Toallitas	12 x 60 cuenta toallitas 7 in. x 8 in. / 17.8 cm x 20.3 cm Botes	Listo para usar	100850922 
Oxivir® 1 Toallitas	12 x 160 cuenta toallitas 6 in. x 7 in. / 15.24 cm x 17.78 cm Botes	Listo para usar	100850923 
Oxivir® 1 Toallitas	12 x 60 cuenta toallitas 10 in. x 10 in. / 25.4 cm x 25.4 cm Botes	Listo para usar	100962573 
Oxivir® 1 Toallitas	4 x 160 cuenta toallitas 11 in. x 12 in. / 27.9 cm x 30.5 cm Cubos	Listo para usar	100850924 
Oxivir® 1 Toallitas	4 x 160 cuenta toallitas 11 in. x 12 in. / 27.9 cm x 30.5 cm Recargas	Listo para usar	100850925 

## El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío..