



Concentré Accel[®] PREvention^{™/MC}

48

Concentré nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Désinfectant à spectre large tuberculocide, virocide, bactéricide fongicide

Un désinfectant concentré à large spectre de niveau intermédiaire, basé sur une technologie exclusive à AHP[®] pour offrir une performance de nettoyage rapide et efficace.

Caractéristiques et avantages

- Efficace contre les pathogènes clés, incluant le MRSA, VRE, TV, norovirus et poliovirus, offrant une désinfection à large spectre
- Virucide, bactéricide, tuberculocide et fongicide en 5 minutes à un ratio de 1:40. Il s'agit également d'un désinfectant à large spectre de 30 secondes à un ratio de 1:128 et un nettoyant léger à 1:256
- Compatible avec la majorité des surfaces non poreuses tout en maîtrisant la puissance de la technologie AHP[®]. L'agent actif AHP[®] se décompose en oxygène et en eau après utilisation.
- La meilleure cote de sécurité dans la dilution, et non irritant pour les utilisateurs

Applications

- Nettoie et désinfecte les appareils médicaux non critiques, l'équipement et les surfaces dures non poreuses





Concentré Accel® PREvention™/MC

Concentré nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Directives d'utilisation

Préparation de la solution

Proportions	Par litre d'eau	Par 32 onces d'eau
1:40	25 mL	0,8 once
1:128	8 mL	0,25 once (1/4 once)
1:256	4 mL	0,125 once (1/8 once)

Pour utiliser comme concentré nettoyant et désinfectant de surface en une étape

- Les surfaces très sales nécessitent un nettoyage avant la désinfection.
- Diluer en proportion de 1:40 et l'appliquer à la surface avec un chiffon ou lingette jetable.
- Permettre à la surface traitée de rester humide pendant 5 minutes.
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin.
- Préparer une nouvelle solution si la solution devient visiblement souillée ou diluée.

Utilisation comme agents d'assainissement n'entrant pas en contact avec les aliments

- Diluer en proportion de 1:128 et l'appliquer à la surface.
- Permettre à la surface traitée de rester humide pendant 30 secondes.
- Essuyer les surfaces et laisser sécher à l'air libre.

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur une petite surface cachée en cas d'inquiétude d'incompatibilité, ou communiquer avec un représentant Diversey Care.

* Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes

Instructions d'installation de la bouteille en boucle fermée de 5 l

- Dévisser le bouchon de la bouteille de 5 l de concentré Accel Prevention.
- Fixer le bouchon de connexion* du système de dilution personnalisé Accel à la bouteille de 5 L (le bouchon de connexion s'attachera à l'insertion à l'intérieur de la bouteille de 5 L pour enlever le concentré).
- Voir les directives d'utilisation du système de dilution personnalisé Accel pour de plus amples détails.

* Bouchon homologué de boucle fermée compris

Données techniques	Concentré Accel® PREvention™/MC
DIN	02448629
Certifications	EcoLogo
Couleur/forme	Liquide incolore
pH	0,45 (Concentré) 2,2 (dilution aux fins d'emploi de 1:40)
Odeur	Caractéristiques des ingrédients
Durée sur les tablettes	2 ans (concentré), 30 jours (dilution aux fins d'emploi)

Produit	Emballage	Dilution	Code du produit	
Concentré Accel® PREvention™/MC	Contenants de 4 X 4 L / 1,06 gallon américain	1:256	100906586	🇨🇦
Concentré Accel® PREvention™/MC	Contenants de 2 X 5 L / 1,32 gallon américain	1:256	100906588	🇨🇦
Concentré Accel® PREvention™/MC	2 x 1,5 L RTD® / 50.7 oz.	1:256	100940209	🇨🇦

Manipulation sécuritaire

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

AHP et Design® sont des marques enregistrées de Virox technologies, Inc. utilisées sous license.

www.diversey.com

© 2019 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS90446 (19/108)