

ALL-PURPOSE  
**VIREX**<sup>®</sup>  
DISINFECTANT CLEANER

# All Purpose Virex<sup>®</sup>

## Limpiador desinfectante

El limpiador desinfectante Virex<sup>®</sup> de propósitos múltiples es un desinfectante listo para usar, de base cuaternaria, para uso en hospitales, que proporciona una excelente limpieza y desodorización en un solo paso.

### Características y Beneficios

- Bactericida, tuberculocida, virucida, fungicida
- Mata Norovirus, VRE y MRSA
- Listo para usar
- Aroma cítrico
- Desinfecta múltiples organismos en tres minutos
- Mata Norovirus, VRE y MRSA
- Cumple los estándares de la OSHA para patógenos transportados en la sangre para descontaminar la sangre y fluidos corporales (HBV, HCV y VIH-1)
- Proporciona una destrucción de amplio espectro de microorganismos, tales como HBV, HIV-1, VRE, MRSA, MRSE, VISA, PRSP, Influenza Tipo A2, Adenovirus, Rotavirus y muchos más
- Mata los organismos que causan olores y funciona como contraatacante de olores

### Aplicaciones




- Se puede aplicar con un trapeador, esponja o paño
- Para usar en superficies duras, inanimadas y no porosas, como pisos, paredes, porcelana y plástico en hospitales, asilos, escuelas, colegios y hoteles



**Instrucciones de uso**

- **DESINFECCIÓN, DESODORIZACIÓN Y LIMPIEZA** - Elimine la suciedad gruesa o pesada antes de aplicar el producto. Sostenga el envase a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie a ser tratada. Rocíe el área hasta que quede cubierta con la solución. Deje penetrar el producto y deje la superficie húmeda por 3 minutos (para patógenos transportados en la sangre: deje la superficie húmeda para VIH-1 por 1 minuto y para HBV y HCV por 5 minutos). No es necesario fregar. Limpie con un paño, trapeador o esponja limpia. El producto no deja restos de abrasivo ni de jabón.
- **Para desinfectar superficies de contacto con alimentos en establecimientos de servicios de alimentos:** Antes de usar este producto, se deben retirar los productos de alimentos y materiales de embalaje o protegerse con cuidado. Para encimeras, aparatos y mesas, mantenga el envase a una distancia de seis a ocho pulgadas de la superficie a tratar y rocíe el área hasta que esté cubierta con la solución. Deje penetrar el producto y que la superficie quede húmeda por 3 minutos (para patógenos transportados en la sangre: deje que la superficie quede húmeda para VIH-1 por 1 minuto y para HBV y HCV por 5 minutos). Limpie con un paño, trapeador o esponja limpia y enjuague bien todas las superficies en el área con agua potable. Las áreas con suciedad pesada deben limpiarse previamente antes de usar este producto. No use en utensilios para comer, cristalería y platos.
- **Usando métodos de prueba aprobados de AOAC, en presencia de suero sanguíneo al 5% y un tiempo de contacto de 3 minutos, a menos que se indique lo contrario, este producto mata los siguientes organismos en superficies inanimadas rígidas no porosas:**  
**BACTERIAS:** Pseudomonas aeruginosa, (ATCC 15442), Staphylococcus aureus, (ATCC 6538), Salmonella enterica, (ATCC 10708).
- **MOHO Y HONGOS** - Para controlar el moho y hongos en superficies rígidas, no porosas, previamente limpiadas, rocíe las superficies a tratar, asegurándose de que se humedezcan por completo. Deje secar al aire.

Datos técnicos	All Purpose Virex <sup>®</sup> Limpiador desinfectante
Reg. EPA N°	1839-83-70627
Color/Forma	Claro
pH	12.13
Aroma	Claro
Tiempo de conservación	3 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
All Purpose Virex <sup>®</sup> Limpiador desinfectante	8 x 32 fl. oz / 946 mL	Listo para usar	CBD540533 
All Purpose Virex <sup>®</sup> Limpiador desinfectante	4 x 32 fl. oz / 946 mL	Listo para usar	CBD540540 
All Purpose Virex <sup>®</sup> Limpiador desinfectante	2 Contenedor x 3.78 L / 1 gal.	Listo para usar	CBD540557 

**El manejo seguro**

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.