



# Oxivir® Tb Toallitas

## Desinfectante general virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida

Limpiador desinfectante previamente humedecido, listo para usar basado en la tecnología patentada AHP® para una limpieza rápida y efectiva.

### Características y Beneficios

- Limpiador desinfectante en un solo paso potenciado por la tecnología AHP®
- Eficaz contra patógenos clave: TB, MRSA, norovirus, VRE y *Candida auris*
- Mata el VHB, el VHC y el VIH en 1 minuto. Tuberculocida en 5 minutos y Fungicida en 3 minutos y 5 minutos para *Candida auris*
- Sin COV, sin fragancias agregadas y sin NPE. Ambientalmente responsable: el ingrediente activo se descompone en oxígeno y agua
- Compatible con la mayoría de las superficies duras, no porosas
- Conveniente: las toallitas previamente humedecidas facilitan las tareas más difíciles

### Aplicaciones

- Limpia y desinfecta superficies de alto contacto en solo UN minuto
- No irrita los ojos y la piel





# Oxivir® Tb Toallitas

Desinfectante general virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida

## Instrucciones de uso

### Como desinfectante de un solo paso

- Limpia en profundidad las áreas sucias.
- Aplica el producto con el spray grueso o con un paño descartable para limpiar superficies duras, no porosas e inanimadas.
- Todas las superficies deben estar visiblemente húmedas por 1 minuto.
- Utilice un tiempo de contacto de 5 minutos para la tuberculosis y un tiempo de contacto de 3 minutos para los hongos y de 5 minutos para la *Candida auris*. Deje secar al aire, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua limpia según sea necesario.
- **Nota:** No es necesario enjuagar al menos que se vaya a revestir o restaurar la superficie. Todas las superficies en contacto con alimentos deben ser enjuagadas con agua potable. No utilice el limpiador para limpiar vasos, platos ni utensilios.

Antes de utilizar el producto por primera vez sobre una superficie determinada, se recomienda probarlo sobre un área pequeña y discreta en caso de tener dudas sobre su incompatibilidad, o contactar a un representante de Diversey.

Datos técnicos	Oxivir® Tb Toallitas
EPA Reg. No.	70627-60 (Botes, Cubos, Recargas) 74559-3 (Paquetes suaves)
Color/Forma	Incoloro, toallita
pH	2.2 - 3.2
Aroma	Característica
Tiempo de conservación	2 años - 6 x 7 in Toallitas (Botes) 3 años - 7 x 8 in Toallitas (Botes), 7.48 x 10 in Toallitas (Paquetes suaves), 11x12 in Toallitas (Cubos y Recargas)

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Oxivir® Tb Toallitas	12 x cuenta 160 6 x 7 in. Toallitas / 15.24 x 17.78 cm Botes	Listo para usar	4599516 
Oxivir® Tb Toallitas	4 x cuenta 160 6 x 7 in. Toallitas / 15.24 x 17.78 cm Botes	Listo para usar	101105152 
Oxivir® Tb Toallitas	12 x cuenta 60 7 x 8 in. Toallitas / 17.8 x 20.3 cm Botes	Listo para usar	5388471 
Oxivir® Tb Toallitas	4 x cuenta 160 11 x 12 in. Toallitas / 27.9 x 30.5 cm Cubos	Listo para usar	5627427 
Oxivir® Tb Toallitas	4 x cuenta 160 11 x 12 in. Toallitas / 27.9 x 30.5 cm Recargas	Listo para usar	100823906 
Oxivir® Tb Toallitas	120 x 8 cuenta 7.48 x 10 in. Toallitas / 18.99 x 25.4 cm Paquetes suaves	Listo para usar	100949406 

## El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.

AHP® y Design son marcas comerciales de Diversey, Inc.