



Accel<sup>®</sup>  
INTERVention<sup>™/MC</sup>  
RTU  
Nettoyant et  
désinfectant  
de surface en  
une étape



Tuberculocide, Virucide, Bactéricide, Fongicide,  
Assainisseur à large spectre

Un nettoyant désinfectant facile à utiliser basé sur  
les propriétés de la technologie AHP<sup>®</sup> afin d'offrir  
un rendement nettoyant efficace et rapide.

**Caractéristiques**

- Nettoyant désinfectant à une seule étape
- Optimisé par la technologie AHP<sup>®</sup>
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol
- Respectueux de l'environnement - un ingrédient actif se dématérialise en oxygène et eau

**Avantages**

- Efficace contre les pathogènes clés - incluant les SARM, ERV, TB et norovirus
- Élimine le norovirus, le poliovirus et les pathogènes à diffusion hémotogène et est tuberculocide, et ce, en une (1) minute
- Désinfectant à spectre large en 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses
- Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule étape de travail

**Applications**

- Nettoient et désinfectent les surfaces hautes en UNE (1) seule minute
- Non irritant pour les yeux et la peau



# Accel® INTERVention™/MC RTU

Nettoyant et désinfectant de surface en une étape



## Mode d'emploi

### En tant que nettoyant désinfectant à une seule étape\*:

- Nettoyer préalablement les endroits souillés.
- Appliquer le produit par vaporisation rudimentaire à gâchette sur les surfaces non poreuses inanimées.
- Toutes les surfaces traitées doivent rester humides pendant 1 minute.
- Essuyer les surfaces, les rincer ou les laisser sécher à l'air.

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur une petite surface cachée en cas d'inquiétude d'incompatibilité, ou communiquer avec un représentant Diversey Care.

\* Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes

## Spécifications du produit

Description	
DIN	02448645
Couleur/Forme	Liquide incolore
pH	3
Odeur	Caractéristique
Durée de conservation	3 ans

## Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
100906583	12 x 1 L / 1.06 U.S Qt. bouteilles	Prêt-à-l'emploi
100908295	4 X 4 L / 1.06 U.S. Gal. conteneurs	Prêt-à-l'emploi

## Rappel des consignes de sécurité

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.sealedair.com](http://www.sealedair.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.

AHP et Design<sup>®</sup> sont des marques de commerce de Virox Technologies, Inc. utilisées en vertu d'une licence.

[www.sealedair.com](http://www.sealedair.com)

© 2016 Sealed Air Corporation. Tous droits réservés. PSS90445F (16/294)