



Lingettes de nettoyant désinfectant Avert[®]

Une lingette nettoyante désinfectante, prête à l'emploi, préhumidifiée, à application simple permettant également d'éliminer les spores de *clostridium difficile* (*C. difficile*) sur les surfaces dures et non poreuses, notamment dans les hôpitaux et autres établissements de santé.

Caractéristiques et Avantages

- Efficace en 4 minutes contre les spores *Clostridium difficile* (*C. difficile*). Nettoie, désinfecte et désodorise en une étape, permettant de gagner du temps
- Aucun rinçage requis après l'utilisation. Efficace après une durée de contact de 1 minute contre un large spectre de pathogènes y compris des bactéries, des bactéries résistantes aux antibiotiques, des virus et des champignons
- Teneur en chlore de 12 500 ppm qui dépasse les recommandations de Santé Canada, des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), de la SHEA (Society for Healthcare Epidemiology of America), de la PIC (association Prévention et contrôle des infections Canada) et de l'AORN (Association of Perioperative Registered Nurses)

Applications

- Nettoyant et désinfectant de surfaces dures
 - Conçu pour désinfecter les surfaces inanimées dures non poreuses d'installations médicales, notamment : le verre, la porcelaine émaillée et l'acier inoxydable. Non recommandé pour une utilisation sur : l'aluminium, le laiton, l'émail ébréché, le plastique transparent, le cuivre, les revêtements de sol avec finition, le marbre naturel, les surfaces peintes et l'argent.
- Remarque : ce produit est compatible avec les matériaux énumérés. Il est recommandé de mettre le produit à l'essai avant de l'utiliser sur d'autres surfaces. Pour ce faire, appliquer le produit sur une zone discrète pour en déterminer la comptabilité avant de l'utiliser à plus grande échelle. Sinon, communiquer avec un représentant Diversey





Lingettes de nettoyage désinfectant Avert®

Mode d'emploi

Directives spéciales de nettoyage avant la désinfection contre les spores *Clostridium difficile* :

Protection individuelle :

- Porter des vêtements protecteurs adéquats comme des gants, un sarrau, un masque ou des lunettes de protection.

Marche à suivre pour nettoyer :

- Les surfaces et objets doivent être entièrement nettoyés et exempts de matières fécales et de déchets avant d'être désinfectés avec ce produit. Le nettoyage doit se faire en essuyant ou en frottant vigoureusement la zone, jusqu'à ce que toute tache visible ait disparu. Prêter particulièrement attention aux surfaces les plus souvent touchées. Les surfaces dans les chambres des patients doivent être nettoyées de façon adéquate, par exemple de droite à gauche ou de gauche à droite, pour les surfaces horizontales, et de haut en bas pour les surfaces verticales, afin de réduire la dispersion des spores. Les toilettes doivent être nettoyées en dernier. Ne pas réutiliser les chiffons salis.

Élimination du matériel infectieux :

- Le matériel de nettoyage usagé pouvant contenir des excréments ou des déchets doit être éliminé immédiatement, en accord avec les dispositions locales en matière d'élimination du matériel infectieux.

Désinfection procédure :

- Essuyer les surfaces dures, non poreuses et inanimées avec une lingette jusqu'à complètement mouillée. Toutes les surfaces doivent rester humides pendant 4 minutes. Essuyer les surfaces et les laisser sécher à l'air libre.

*Rincer à l'eau potable au besoin.

Destiné à une utilisation en tant que nettoyant, désinfectant, désodorisant et fongicide tout-en-un :

1. Nettoyer préalablement les zones très souillées.
2. Essuyer les surfaces dures, non poreuses et inanimées avec une lingette.
3. Toutes les surfaces doivent rester humides pendant 1 minute.
4. Essuyer les surfaces et les laisser sécher à l'air libre.

*Rincer à l'eau potable au besoin.

Données techniques	Lingettes de nettoyage désinfectant Avert®
DIN	02438526
Couleur	Liquide jaune pâle lingette pré-humide
pH	12,5
Parfum	Chlore
Durée de conservation	12 mois

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Lingettes de nettoyage désinfectant Avert®	4 x 160 comptage 11 x 12 in. Lingettes / 27,9 x 30,5 cm Seaux	Prêt à l'emploi	100895933	

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.