



Accel[®] PREvention^{TM/MC} RTU

Nettoyant et désinfectant de surface tout-en-un

Désinfectant tuberculocide, virucide, bactéricide et fongicide à large spectre

Une lingette nettoyante désinfectante préhumectée et prête à l'emploi, fabriquée selon une technologie exclusive à AHP[®] afin d'offrir un rendement nettoyant efficace et rapide.

Caractéristiques et Avantages

- Efficace contre les principaux pathogènes, notamment le SARM, le EVR, la tuberculose, le norovirus, le VIH et le poliovirus; offre une désinfection à large spectre
- Virucide, bactéricide, tuberculocide et fongicide en 3 minutes. Il s'agit également d'un désinfectant à large spectre de 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses tout en maîtrisant la puissance de la technologie au peroxyde d'hydrogène (AHP[®]). L'agent actif AHP[®] se décompose en oxygène et en eau après utilisation
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol. Il s'agit non irritant pour les yeux et la peau
- Nettoie et désinfecte les surfaces en une étape, permettant d'économiser temps et main-d'oeuvre

Applications

- Nettoie et désinfecte les surfaces souvent touchées en 3 minutes
- Non irritant pour les yeux et la peau





Accel[®] PREvention^{TM/MC} RTU

Nettoyant et désinfectant de surface tout-en-un

Suivre les directives :

Comme désinfectant nettoyant en une étape*:

- Prénettoyer les surfaces très souillées.
- Appliquer par vaporisation à gros jet pour appliquer le produit sur les surfaces inanimées dures et non poreuses.
- Toutes les surfaces doivent rester mouillées pendant 3 minutes.
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin.

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur un coin caché si on craint l'incompatibilité ou communiquer avec un représentant de soins Diversey.

* Consulter l'étiquette intégrale du produit pour la liste complète des instructions s'y rapportant

Données techniques	Accel [®] PREvention ^{TM/MC} RTU
DIN	02448521
Certifications	EcoLogo
Couleur	Liquide incolore
pH	2,1
Parfum	Caractéristique des ingrédients
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Accel [®] PREvention ^{TM/MC} RTU	12 bouteilles de 1 L / 1.06 U.S. Qt.	Prêt-à-l'emploi	100906589	🇨🇦
Accel [®] PREvention ^{TM/MC} RTU	4 conteneurs de 4 L / 1.06 U.S. gal.	Prêt-à-l'emploi	100908439	🇨🇦

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.

Accelerated Hydrogen Peroxide[®] and AHP[®] sont des marques de commerce de Virox Technologies, Inc. utilisées en vertu d'une licence.