



Lingettes Alpha-HP®

Defense contre les germes

Lingettes nettoyantes désinfectantes prête à utiliser


Lingettes pratiques à base de Peroxyde d'hydrogène accéléré, offrant des performances de nettoyage et de désinfection rapides et efficaces.

Caractéristiques et Avantages

- Bactéricides et virucides en une minute
- Compatibles avec la plupart des surfaces dures et non poreuses, elles bénéficient de toute la puissance du Peroxyde d'hydrogène accéléré®
- Le Peroxyde d'hydrogène accéléré® actif se décompose en eau et en oxygène après usage
- Il offre des performances de nettoyage et de désinfection rapides et efficaces
- Santé Canada a approuvé l'allégation d'élimination du virus du SRAS-CoV-2 sur les surfaces dures et non poreuses

Applications

- Nettoie et désinfecte les surfaces fréquemment touchées
- Non irritant pour les yeux et la peau

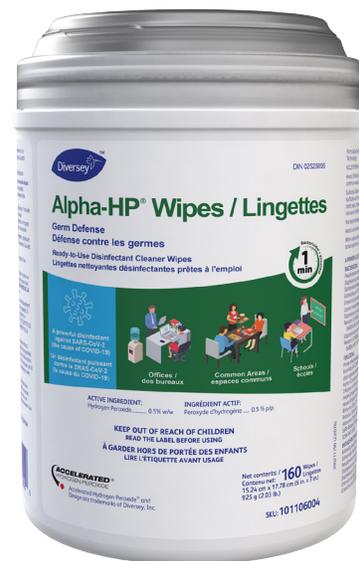



Lingettes Alpha-HP®

Defense contre les germes
Lingettes nettoyantes désinfectantes prête à utiliser

Alpha-HP® Wipes est une lingette nettoyante désinfectante pré-humidifiée, prête à utiliser, basée sur la technologie brevetée du Peroxyde d'Hydrogène Accélééré® qui offre une performance de nettoyage rapide et efficace.

Mode d'emploi

- Nettoyez préalablement les zones très sales.
- Appliquez la solution avec un chiffon ou une lingette jetable sur des surfaces dures et non poreuses.
- Toutes les surfaces doivent rester humides pendant une minute pour tuer les bactéries, le VIH-1, le VHB et le VHC.
- Laissez sécher à l'air, ou essuyez pour sécher les surfaces et éliminer tout résidu, ou rincez à l'eau potable si nécessaire.
- Fournit une désinfection à large spectre des surfaces de contact non alimentaires en seulement 30 secondes.
- Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur le laiton, le cuivre, l'aluminium, le bronze, le granit, le zinc ou le marbre.
- Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable après désinfection.

Données techniques	Lingettes Alpha-HP®
N° d'enregistrement DIN	02525895
Couleur/Forme	Incolores
pH	2,2 – 3,2
Parfum	Caractéristiques des ingrédients
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Lingettes Alpha-HP®	4 x 160 compteurs 15.24 x 17.78 cm Lingettes	Prêt à l'emploi	101106004 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Peroxyde d'hydrogène accéléré® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.