



# Accel<sup>®</sup> INTERVention<sup>™/MC</sup> RTU

## Nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Tuberculocide, Virucide, Bactéricide, Fongicide, Assainisseur à large spectre

Un nettoyant désinfectant facile à utiliser basé sur les propriétés de la technologie AHP<sup>®</sup> afin d'offrir un rendement nettoyant efficace et rapide.

### Caractéristiques et Avantages

- Efficace contre les principaux pathogènes, notamment le SARM, le EVR, la tuberculose, le norovirus, le VIH et le poliovirus; offre une désinfection à large spectre
- Élimine le norovirus, le poliovirus et les pathogènes à diffusion hémotogène et est tuberculocide, et ce, en une (1) minute. Il s'agit également d'un désinfectant à large spectre de 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses tout en maîtrisant la puissance de la technologie au peroxyde d'hydrogène (AHP<sup>®</sup>). L'agent actif AHP<sup>®</sup> se décompose en oxygène et en eau après utilisation
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol. Il s'agit non irritant pour les yeux et la peau
- Nettoie et désinfecte les surfaces souvent touchées en 1 minute

### Applications

- Nettoient et désinfectent les surfaces hautes en UNE (1) seule minute
- Non irritant pour les yeux et la peau





# Accel<sup>®</sup> INTERVention<sup>TM/MC</sup> RTU

Nettoyant et désinfectant de surface en une étape

## Mode d'emploi

### En tant que nettoyant désinfectant à une seule étape\*:

- Nettoyer préalablement les endroits souillés.
- Appliquer le produit sur des surfaces inanimées dures non poreuses.
- Toutes les surfaces traitées doivent rester humides pendant 1 minute.
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin.

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur un coin caché si on craint l'incompatibilité ou communiquer avec un représentant de soins Diversey.

\* Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes

Données techniques	Accel <sup>®</sup> INTERVention <sup>TM/MC</sup> RTU
DIN	02448645
Couleur	Liquide incolore
pH	3
Parfum	Caractéristique des ingrédients
Durée de conservation	3 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Accel <sup>®</sup> INTERVention <sup>TM/MC</sup> RTU	12 bouteilles de 1 L / 1.06 U.S Qt.	Prêt-à-l'emploi	100906583 
Accel <sup>®</sup> INTERVention <sup>TM/MC</sup> RTU	4 conteneurs de 4 L / 1.06 U.S. gal.	Prêt-à-l'emploi	100908295 

## Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.

Accelerated Hydrogen Peroxide<sup>®</sup> and AHP<sup>®</sup> sont des marques de commerce de Virox Technologies, Inc. utilisées en vertu d'une licence.