

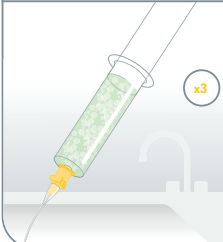
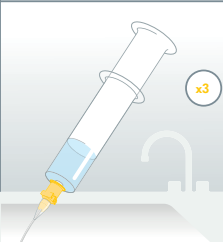
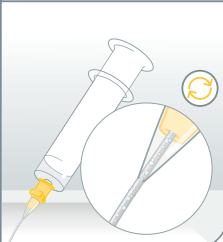
Supplemental Nursing System™ (SNS™)

Guide étape par étape sur la méthode de nettoyage, d'assemblage et d'utilisation de votre SNS

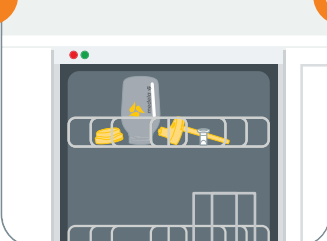


Comment nettoyer votre SNS

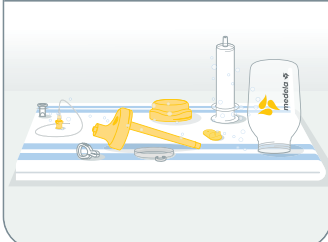
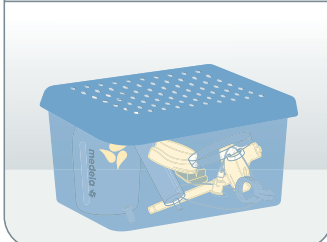
Avant la première utilisation et après chaque utilisation

Rincez toutes les pièces à l'eau froide (environ 20 °C/68 °F).	Nettoyez toutes les pièces à l'eau chaude et savonneuse (environ 30 °C/86 °F).	Rincez de nouveau toutes les pièces à l'eau froide (environ 20 °C/68 °F).	Remplissez le dispositif de nettoyage à l'eau chaude et savonneuse, puis rincez le tube trois fois.	Rincez à nouveau le tube trois fois à l'eau propre.	Enfin, rincez le tube avec de l'air jusqu'à ce que l'intérieur soit visiblement sec.
					

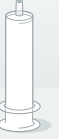
Avant la première utilisation et une fois par jour

Nettoyez ensuite le contenant, le couvercle TwistLok®, la valve et le couvercle avec de l'eau bouillante, au lave-vaisselle ou avec les sacs Medela Quick Clean™.	Pour le nettoyer avec de l'eau bouillante, couvrez le contenant, le couvercle TwistLok, la valve et le couvercle avec de l'eau et faites bouillir pendant cinq minutes.	OU	Pour le nettoyer au lave-vaisselle, placez le contenant, le couvercle TwistLok, la valve et le couvercle sur le plateau supérieur ou dans la section pour les ustensiles.	OU	Pour nettoyer le contenant, le couvercle TwistLok, la valve et le couvercle dans le four à micro-ondes, utilisez les sacs Medela Quick Clean™ conformément aux instructions figurant sur le sac.
					

Séchage et rangement

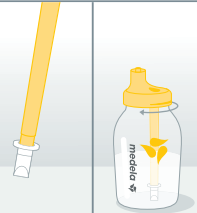
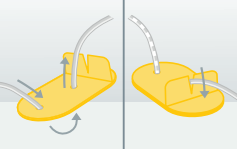
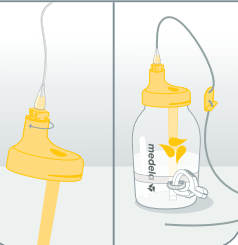
Après le nettoyage, séchez toutes les pièces avec un chiffon propre ou laissez-les sécher sur un chiffon propre.	Rangez les pièces propres dans un endroit propre. Ne rangez pas les pièces dans un contenant hermétique ou un sac étanche à l'air.
	

Votre système SNS

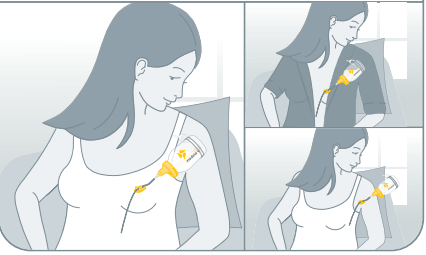
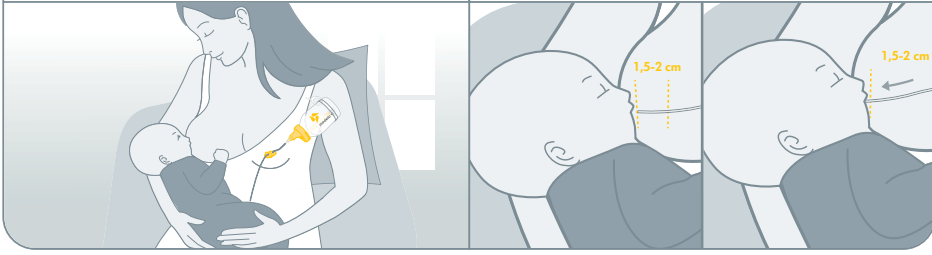
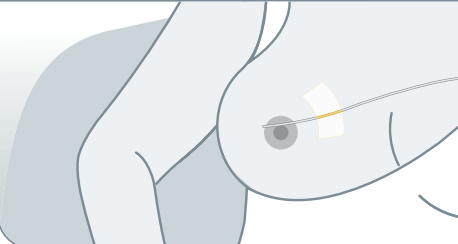
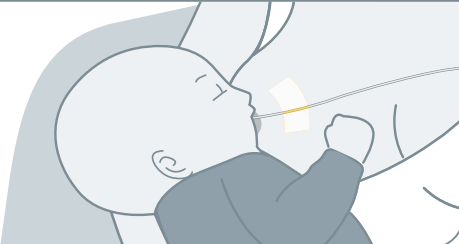
				
Contenant	Couvercle	Couvercle TwistLok	Tube	Dispositif de nettoyage
				
Ring	Clip	Valve	Clamp	

Comment assembler votre SNS™

Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant l'utilisation.

1 Remplissez le contenant avec la quantité de lait requise. 	2 Fixez le crochet à l'anneau. Placez l'anneau et le crochet assemblés autour de la base du contenant. 	3 Placez la valve sur l'extrémité du couvercle TwistLok. Vissez le couvercle TwistLok assemblé sur le contenant. 	4 Enfilez le tube TwistLok dans la pince et enfoncez le tube dans la pince de manière à ce que le lait ne puisse pas s'écouler. 	5 Vissez le tube et la pince assemblés sur le couvercle TwistLok. 
--	---	---	---	--

Comment vous placer et allaiter avec votre SNS

1 Attachez fermement et confortablement le SNS à la bretelle de votre soutien-gorge, à votre haut ou au coussin derrière vous. 	2 – Option A Pour placer le tube, il faut d'abord mettre le bébé au sein. Une fois que le bébé a bien pris le sein, insérez doucement le tube d'environ 1,5 à 2 cm dans le coin supérieur de la bouche du bébé. 	
2 – Option B On peut également utiliser du ruban adhésif pour aider à placer le tube. Commencez par fixer l'extrémité du tube au sein avec du ruban adhésif, de manière à ce qu'il dépasse le mamelon d'environ 0,5 cm à la position 10 heures ou 2 heures. Ensuite, mettez le bébé au sein comme vous le feriez normalement.  	3 Libérez la pince pour laisser s'écouler le lait. 	

Si vous n'êtes pas sûre de savoir comment utiliser le SNS, veuillez communiquer avec votre spécialiste en allaitement ou un professionnel de la santé.

Conseils et astuces

- La hauteur du système peut être augmentée pour accroître le débit et abaissée pour le diminuer.
- Quelques tentatives peuvent être nécessaires avant que l'utilisation du SNS ne devienne un moyen facile d'allaiter. Si vous-même ou votre bébé éprouvez des difficultés ou une gêne, réessayez à la prochaine séance d'allaitement.

Scannez le code QR pour plus de renseignements sur le SNS



Pour les États-Unis

Scannez le code QR pour plus de renseignements sur le SNS



Pour le Canada