


Waterless Milk Warmer™ Chauffe-lait sans eau

Instructions de démarrage rapide

Consultez le manuel d'instructions pour connaître les mesures de sécurité importantes avant la première utilisation



Déployez l'insert avant de l'installer dans le chauffe-lait

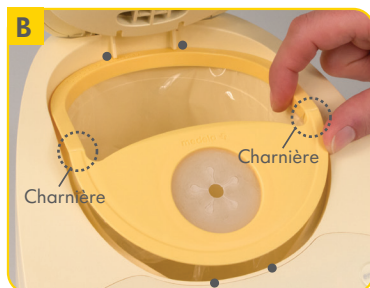

Pliez l'insert au niveau de la charnière et placez-le en position



Répartissez uniformément l'insert à l'intérieur de la cavité du chauffe-lait



Placez le plateau, côté plat vers le bas, dans le fond du chauffe-lait



Charger l'alimentation

NOTE: Toujours utiliser le plateau d'insertion pour réchauffer le récipient ou la seringue



Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche l'appareil

Choisir le programme


Choisir le Mode




Choisir la température de départ



Choisir le Volume

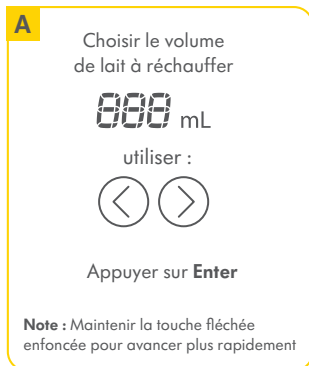


Confirmer et commencer

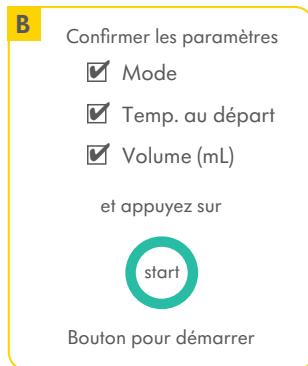

Prêt

Le voyant vert clignotant indique que le lait est prêt

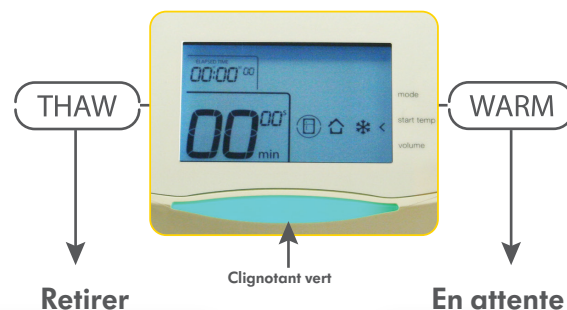

Retirer

En attente

- Décongélation complète
- Retirer le lait avant que la glace ne fonde

NOTE: Passez en mode chauffer lorsque vous êtes prêt à préparer le repas

- Maintien à température pendant 30 minutes
- Retirer récipient ou seringue lorsque prêt à nourrir le bébé

NOTE: Soulever le couvercle pour mettre en pause ou l'arrêter

Nourrir

TRUC : Pour réchauffer ou décongeler du lait dans le Protecteur de Colostrum, consulter la section « Comment réchauffer et décongeler à l'aide du Protecteur de Colostrum ».

Waterless Milk Warmer™ Chauffe-lait sans eau

Instructions de démarrage rapide

Consultez le manuel d'instructions pour connaître les mesures de sécurité importantes avant la première utilisation

**Protecteur de colostrum :
Réchauffer et décongeler dans le chauffe-lait sans eau**



Chauffe-lait sans eau Entrée par mL Volume				
Actual Volume (mL)	Pour Décongeler	Chauffer à partir de Tempéré	Chauffer à partir de Réfrigéré	Chauffer à partir de Congelé
1	1	3	2	1
2	3	3	4	Décongeler 3* Réchauffer 4*
3	6	5	7	3
4	13	12	14	7
5	30	30	30	11
6	45	40	40	18

Note : La double paroi du Protecteur de colostrum Medela agit comme un isolant, ce qui nécessite un temps supplémentaire dans le chauffe-lait sans eau pour décongeler et réchauffer efficacement. Suivez le tableau ci-dessus spécifiquement pour le Protecteur de colostrum Medela.

Ces instructions ne s'appliquent à aucun autre récipient.

Consulter le document « Mode d'emploi » pour obtenir des instructions complètes.

* Pour réchauffer 2 ml à partir d'un état congelé, commencer par décongeler, puis réchauffer en suivant les recommandations du tableau.



Balayez le code QR pour accéder à des ressources pédagogiques supplémentaires utiles.