

## Guide de réglage du AirFit P10




- Tenez les coussins sous votre nez en vous assurant que la marque de la taille se trouve au bas, et de pouvoir lire les marques d'orientation gauche (L) et droite (R).



- Étirez la sangle inférieure derrière votre tête.
- La sangle supérieure devrait reposer confortablement sur le dessus de votre tête.



- Tirez le harnais par-dessus votre tête en tenant la sangle inférieure.

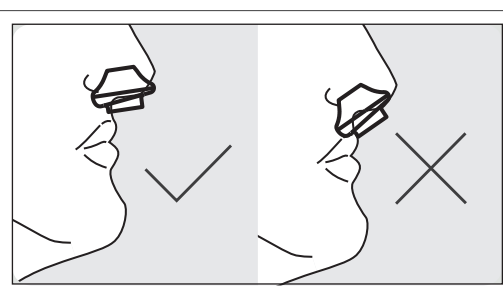

- Dégagez le masque de votre visage et remettez-le en place.
- Assurez-vous que les coussins narinaux se placent bien dans vos narines et que les deux coussins sont à la verticale.



- Enfin, branchez l'embout du masque à la tubulure de votre appareil respiratoire.
- Mettez l'appareil en marche; votre masque est maintenant prêt à être utilisé.



- Si un réglage est nécessaire, écartez simplement les sangles supérieure et inférieure l'une de l'autre pour desserrer le harnais ou ramenez-les plus près l'une de l'autre pour le serrer.

**Remarque :** Pour des instructions détaillées, consultez le guide d'utilisation du masque AirFit P10.

**Rx Only**

\*Valeurs d'émission sonore à deux chiffres déclarées (avec une incertitude de 3 dBA), conformément à la norme ISO 4871.

<sup>1</sup> Analyse ResMed, réf. : D000-0201; eL80798-206. <sup>2</sup> Étude clinique ResMed comparant l'AirFit P10 au Swift FX, réf. : D629-117. Données objectives ResMed (pression, fuite, utilisation, IAHL).

ResMed Corp San Diego, CA, USA Tél. : +1 858 836 5000 ou 1 800 424 0737 (numéro d'appel gratuit), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australie +61 2 8884 1000 ou 1 800 658 189 (numéro d'appel gratuit). Visitez notre site Internet ResMed.com pour plus d'information sur nos bureaux dans le monde. AirFit, QuickFit et QuietAir sont des marques de commerce déposées de ResMed Ltd. Swift est une marque de commerce déposée de ResMed Ltd et est déposée au bureau de brevet et de marque déposée des États-Unis. ©2014 ResMed. Les spécifications pourraient être modifiées sans préavis. 1016855/1 2014-01



## Un masque plus silencieux pour mieux dormir.

Le masque nasal AirFit™ P10 fait partie de la nouvelle série AirFit de ResMed : le réglage adapté à vos besoins. Ce masque est notre modèle le plus silencieux à ce jour et offre la fiabilité et la qualité de performance du Swift™ FX, avec une conception environ 50 % plus légère et plus silencieuse.<sup>1</sup> Une étude a également montré que les patients qui utilisent l'AirFit P10 dormaient au moins 40 minutes de plus par nuit.<sup>2</sup>

### Plus silencieux

L'évent en mailles tissées de la technologie QuietAir™ fait de ce modèle le plus silencieux des masques ResMed à ce jour, ce qui facilite son acceptation par le patient.

### Plus léger

50 % plus léger que notre masque de coussins narinaux le plus populaire,<sup>1</sup> procurant aux patients le confort d'une meilleure nuit de sommeil.

### Plus facile à utiliser

Coussins narinaux à attache, affichant une couleur différente pour chaque taille et des marques d'orientation gauche/droite permettant un réglage rapide et facile.



# Plus de 40 minutes supplémentaires de sommeil, chaque nuit

Lors d'une étude clinique récente, nous avons observé que les patients dormaient au moins 40 minutes de plus par nuit lorsqu'ils utilisaient l'AirFit P10 de ResMed.<sup>2</sup> Ceci se traduit par presque cinq heures de sommeil supplémentaires par semaine, et contribue à garantir que vos patients respectent leur thérapie du sommeil.



## Caractéristiques et avantages du AirFit P10

**Technologie à double jupe** avec action de rebond et étanchéité au contact, acheminant doucement l'air au nez.

**Coussins nasaires à attache** permettant un assemblage facile, dotés d'un code de couleur pour un réglage facile et de marques d'orientation gauche/droite pour s'assurer que les patients portent le masque correctement.

**Tube flexible innovant,** ultraléger et souple, mais très durable, offrant aux patients une liberté de mouvement complète sans compromettre l'étanchéité.

**L'évent en mailles tissées QuietAir** dirige silencieusement l'air expiré, rendant la respiration presque inaudible pour les patients et leur partenaire.

**Harnais élastique QuickFit™** doté de sangles séparées de conception unique, permettant une stabilité et un réglage avec un contact minimal du visage.

**L'AirFit P10 pour elle** est conçu spécialement pour les femmes, offrant de plus petites tailles adaptées aux contours du visage féminin, ainsi qu'une gamme stylisée de tons et de couleurs.

## Composants du AirFit P10




Harnais élastique QuickFit  
**62935**

Harnais élastique QuickFit pour elle  
**62936**

Ensemble contour (inclus le contour et les coussins)  
**62920 (TP)**  
**62921 (P)**  
**62922 (M)**  
**62923 (G)**


Coussin

Contour

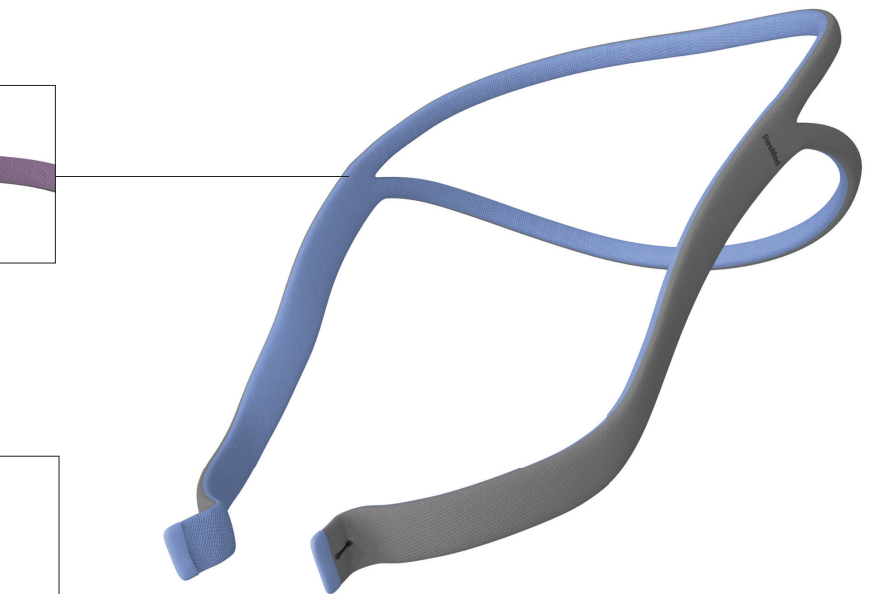

La simplicité en 3 parties

rend l'AirFit P10 50 % plus léger que le masque nasal le plus populaire.<sup>1</sup>

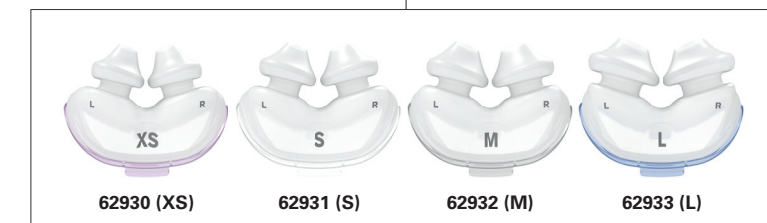

**XS** Très petit  
**S** Petit  
**M** Moyen  
**L** Grand

Coussins

## Codes de produit

AirFit P10 - système complet*	<b>62900</b>
AirFit P10 pour elle - système complet*	<b>62910</b>

\* Les coussins S, M et L sont inclus avec le masque.  
\*\* Les coussins XS, S et M sont inclus avec le masque.

**Remarque :** Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation du masque AirFit P10.

**AirFit™ P10**  
Nasal Pillows System