



Wat is Evisense Pro?

Evisense Pro Aften Gel is een makkelijk aan te brengen gel die een sterke filmlaag vormt over de aft en deze beschermt tegen verdere irritatie en beschadiging. De filmlaag zal de pijn die de aft veroorzaakt verlichten en de genezing bevorderen. De verbeterde formule van Evisense Pro Aften Gel bevat sterke adhesieve eigenschappen waardoor de gel voor een lange tijd blijft zitten.

Toepassing

Evisense Pro Aften Gel kan gebruikt worden ter behandeling van aften en/of kleine wondjes aan het mondslijmvlies.

Gebruiksaanwijzing

- Was voor gebruik uw handen met zeep en spoel deze goed af.
- Duw in één of tweemaal de gewenste hoeveelheid gel op uw vinger en breng de gel voorzichtig aan op de aft.
- Na het aanbrengen wordt de pijnstillende en genezende film gevormd.
- Sluit tube na gebruik.
- De behandeling kan eventueel verschillende keren per dag herhaald worden tot een volledige genezing optreedt.

Wat moet u nog meer weten voordat u Evisense Pro Aften Gel gaat gebruiken?

- Evisense Pro Aften Gel is alleen geschikt voor oraal gebruik.
- Vermijd inslikken van het product.
- Het ontstaan van aften kan het gevolg zijn van onderliggende medische problemen die mogelijk verdere behandeling nodig hebben.
- De behandeling van aften kan 4 weken duren, of meer in het geval van grote letsels.
- Raadpleeg uw huisarts als de aften meer dan 4 weken aanwezig blijven, of als er na de behandeling geen verbetering optreedt.
- Raadpleeg uw huisarts wanneer u 5 aften of meer op hetzelfde moment heeft.
- Indien u allergisch bent voor één van de ingrediënten wordt gebruik afgeraden.
- Bij kinderen onder de 12 jaar, Evisense Pro Aften Gel alleen gebruiken onder supervisie van een volwassene. Voor kinderen jonger dan 4 jaar dient men voor gebruik eerst de huisarts te raadplegen.

- Voor gebruik tijdens de zwangerschap of periode van borstvoeding wordt aangeraden eerst uw huisarts te raadplegen.
- Bewaar dit product buiten bereik van kinderen.
- Bewaar het product op een droge, koele plaats uit de buurt van hitte en direct zonlicht.
- Vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen, overmatig spoelen met water.
- Wij adviseren elke 6 maanden een bezoek aan de tandarts voor een gezonde mondhygiëne.
- Niet gebruiken na de vervaldatum. Na openen bij voorkeur binnen de 6 maanden gebruiken.

Opmerking: elk ernstig incident met betrekking tot dit product moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u gevestigd bent.



SYLPHAR NV
Xavier De Cocklaan 24 - 9831 Deurle - België

Distributeur:

VEMEDIA BV

Postbus 171 - 1110 BC - Diemen
Vemedia informatielijn : 0900 2333666
of www.evisensepro.nl

SYMBOLEN:

- fabrikant
- medisch hulpmiddel
- lot nummer
- vervaldatum
- bewaar uit direct zonlicht
- droog bewaren
- lees de gebruiksaanwijzing
- niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
- één patiënt, meervoudig gebruik



We'd love to hear from you and get any feedback you have on our product.



CE
0197

