

Otalgan Oorspray Hygiëne reinigt mild en veilig (indien gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing) de gehoorgang, spoelt overtollig oorsmeer weg, verwijdert onzuiverheden en voorkomt dat oorsmeer zich ophoopt.

**Toedieningswijze:** oorspray oplossing

### **Gebruiksaanwijzing**

Volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar:

- Spray 1-2 keer in elk oor.
- Herhaal 2-3 keer per week.

Medisch hulpmiddel klasse IIa.

Lees het doosje vóór gebruik.

**Herbruikbaar:** 1 gebruiker per spray.

Kinderen onder 10 jr onder toezicht van volwassene. Niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid voor zeewater. Niet gebruiken indien beschadigd. Transparante beschermingsdop niet verwijderen. Niet gebruiken na uiterste houdbaarheidsdatum. Sommige onderdelen kunnen losraken. Buiten zicht en bereik van kinderen houden. Bij twijfel of aanhoudende symptomen arts of apotheker raadplegen. Bewaren in de originele verpakking tussen 8°C/46°F en 35°C/95°F. Niet gebruiken als de transparante beschermdop ontbreekt.

**Samenstelling:** 100% Isotoon zeewater\*

\*Vergelijkbare concentratie van NaCl als in menselijke cellen (9 g/L).

Natuurlijke oplossing.

Zonder conserveermiddelen.